

U

REIHE




Ultra-Tiefkühlschränke

B Medical Systems | U Reihe

Ultra-Tiefkühlschränke sind Geräte zur Lagerung von Blutbestandteilen und Blutplasma, menschlichen Zellen, Geweben, Impfstoffe mit lebenden MKS-Viren und anderen Laborproben bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -86°C . Die Geräte verfügen über ein integriertes Alarmsystem, das vor unerwarteten Temperaturschwankungen und Stromausfällen warnt.

Konform zu DIN 13277 | Medizinprodukte gemäß

MDR (EU) 2017/745, Klasse IIa oder 21CFR Part 864.9700, Klasse II

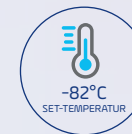

medical
systems

SAVING LIVES
THROUGH RELIABLE
AND INNOVATIVE
TECHNOLOGY

Blood Management Solutions



Sicherheitsstandards

B Medical Systems

Die von B Medical Systems entwickelten **Sicherheitsstandards** definieren bestimmte wesentliche technische Merkmale eines Produkts. Diese sorgen für die sichere Lagerung der Präparate und gewährleisten höchste Sicherheitsstandards für den Benutzer.

PREMIUM LINE	
●	B Medical Systems Elektronik
●	B Medical Systems 7-Zoll-Touchscreen-Anzeige
●	Netzkontrollleuchte und digitale Temperaturanzeige (Anzeige: 0.1 Digits)
●	Netzunabhängige Alarmanrichtung mit integriertem Akku übernimmt die Alarmfunktion und die Temperaturwertmessungen bei einem Stromausfall für mindestens 48 Std
●	Akustisches und optisches Alarmsignal bei Temperaturalarm und Stromausfall
●	Das Alarmprotokoll der Elektronik speichert alle relevanten Werte während eines Temperaturalarms: Minimal-, Maximal-, Durchschnittstemperatur und Alarmdauer
●	Fernübertragbares Alarmsignal (über potentialfreien Kontakt) bei Temperaturalarm (Wechslerkontakt)
●	Türöffnungsalarm (Optisch / Akustisch)
●	Ausgelegt und geprüft für Klimaklasse SN / T (Umgebungstemperaturbereich +10°C bis +43°C)
●	Innenraum aus Edelstahl
●	Zusätzliches fernübertragbares Alarmsignal (über potentialfreien Kontakt) bei Stromausfall (Wechslerkontakt)
●	Leichtgängige Gelenkrollen für maximale Standortflexibilität
○	Wasserkühlung extern
○	Umgebungstemperatursensor
●	Ethernet Schnittstelle zur Visualisierung aller Bedien- und Kontrollfunktionen (Hardware- und Software Einstellungen) über *B Connected Überwachungssoftware an einem Peripheriegerät (Computer)
○	*B Connected - Universalsoftware zur Überwachung von Kühlgeräten, einschließlich der Erfassung, Aufzeichnung und Darstellung von Temperaturdaten
●	Integriertes Gerät zur Fernüberwachung der Temperatur (RTMD), das weltweite Echtzeit-Fernüberwachung, Datenzugriff über WEB und GPS-Position bietet

● Standard ○ Optional

Ultra-Tiefkühlschränke

B Medical Systems | U Reihe

5 Modelle • Volumen 232 > 949 L • Set-Temperatur -82°C • Klimaklasse SN/T • Konform zu DIN 13277 | MDR (EU) 2017/745, Klasse IIa

In Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Richtlinien und Vorschriften für Medizinprodukte; Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit zum optimalen Preis.

MODELLE U201-401-501-701-901 | PREMIUM LINE



Exklusive integrierte Elektronik-Griffstange

Alle Funktionen sind leicht zugänglich:

- Digitales Bedienfeld mit umfassenden Funktionen - B Medical Systems 7-Zoll-Touchscreen-Anzeige, in optimaler Höhe in den Türgriff integriert mit vorinstallierter Verbindung für exklusive *B Connected-Überwachungsfunktionen
- Öffnen/Schließen – Robuster Türverschlussmechanismus



Vielseitiges Modulsystem

Herausragende Lagerkapazitäten und Modularität - Große Auswahl an Racks für jeden Anspruch.



Spezialfunktionen

- In der Tür integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht ein schnelleres Öffnen mit einer Bewegung sowie leichten Zugang zur Reinigung
- Isolierte Innentüren sorgen dafür, dass beim Öffnen deutlich weniger Kälte entweicht
- Volle Kompatibilität der Innenmodule und -schienen; es ist nicht erforderlich, neue Racks zu kaufen, da die zuvor in anderen Modellen genutzten Racks verwendet werden können



Hochwertige Materialien

Qualitativ hochwertige Beschichtung, zertifizierte Medizinproduktqualität und antibakterielle Wirkung, auf hochwertigem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer und leichte Pflege.



Ultra-Tiefkühlschränke sind Geräte zur Lagerung von Blutbestandteilen und Blutplasma, menschlichen Zellen, Geweben, Impfstoffe mit lebenden MKS-Viren und anderen Laborproben bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu -86°C. Die Geräte verfügen über ein integriertes Alarmsystem, das vor unerwarteten Temperaturschwankungen und Stromausfällen warnt. Die U Modelle eignen sich für die anspruchsvollsten Anforderungen und überzeugen durch modernste Technologie und eine hohe Wirtschaftlichkeit. Das Kältesystem ist hinsichtlich Energieverbrauch, Abwärme- und Geräuschentwicklung optimal abgestimmt. Die voreingestellte Set-Temperatur von -82°C lässt sich jedoch zwischen -86°C und -20°C regulieren.



Technische Daten

Allgemeine Merkmale




	U201	U401	U501	U701	U901
Brutto- / Nettovolumen (l)	232 / 217	478 / 454	634 / 602	791 / 751	949 / 900
Fläschchen	17000 (2ml)	34500 (2ml)	46000 (2ml)	57500 (2ml)	69000 (2ml)
Lagerkapazität					
Kryo-Boxen	170 (modell H50)	345 (modell H50)	460 (modell H50)	575 (modell H50)	690 (modell H50)
Plasmabeutel*	150 (350ml)	300 (350ml)	400 (350ml)	500 (350ml)	600 (350ml)
Set-Temperatur (voreingestellt)	-82°C				
Set-Temperatur (Einstellbereich) <i>kann in 0.1 Digit-Schritten eingestellt werden</i>	-86°C bis -20°C				
Temperatur Kalt-/ Warmalarmgrenze	-87°C / -77°C				
Klimaklasse (Umgebungstemperaturbereich)	SN / T (+10°C bis +43°C)				
Abtauung	Manuell				
Kältemittel	R290 / R170				
Außenabmessungen H x B x T (mm)	1293 x 699 x 1039	1988 x 699 x 1039	1988 x 845 x 1039	1988 x 992 x 1039	1988 x 1139 x 1039
Innenabmessungen H x B x T (mm)	657 x 447 x 738	1375 x 447 x 738	1375 x 593 x 738	1375 x 740 x 738	1375 x 887 x 738
Nettogewicht mit Standardausrüstung (kg)	195	250	276	297	320

Energy Saver	Betriebsspannung (V)	230	220	230	220	230	220	230	220	230	220
	Frequenz (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	Leistung (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Energieverbrauch (kWh/24h)	13.5	13.5	11.0	12.5	11.3	12.5	11.9	13.5	12.4	15.5
	Wärmeabgabe (Kcal/h)	209	338	326	405	404	433	426	511	444	567
	Kompressorlaufzeit (%)	48	48	46	44	51	47	50	55	59	61
	Geräuschpegel (dB(A)) <i>(in 1m Höhe und 1m Abstand)</i>	49	50	49	50	52	53	48	49	51	52
	Hold over time (-80°C bis -60°C)	1 h 48 min.	1 h 48 min.	2 h 06 min.	2 h 06 min.	2 h 42 min.	2 h 42 min.	2 h 30 min.	2 h 30 min.	2 h 18 min.	2 h 18 min.



Technische Daten Spezifikationen

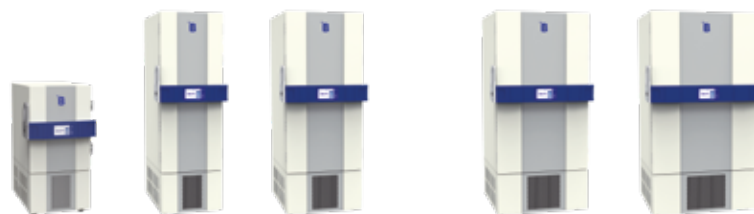

U201-401-501

U701-901

<i>Regelsensor</i>	PT1000, bei $\pm 0^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$
<i>Anzeigesensor</i> in Referenzkörper mit Referenzflüssigkeit 100ml DOW Corning 200-5CST (Silikon Öl)	PT1000, bei $\pm 0^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$
<i>Accu data / Displayanzeige</i> <i>wenn Stromausfall</i>	12 V - 10.0 AH / 48h
<i>Relative Feuchtigkeit bei +32°C</i>	$\leq 75\%$
<i>Tür-Isolation (Polyurethan)</i>	65-82 mm PU mit 20 mm VIP
<i>Gehäuse-Isolation (Polyurethan)</i>	77-82 mm PU mit 20-30 mm VIP
<i>Material</i> <i>Innenkorpus / Tür</i>	Edelstahl (1.4301)
<i>Außenkorpus / Tür</i>	DX51D + Z100 überzogen
<i>Separate Innentüren</i>	Anodisiertem Aluminium
<i>Europäische Medizinprodukteverordnung</i>	MDR (EU) 2017/745, Klasse IIa (modelle: 230 V - 50 Hz)
<i>EMV Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit)</i>	2014 / 30 / EU (modelle: 230 V - 50 Hz)
<i>Niederspannungsrichtlinie</i>	2014 / 35 / EU (modelle: 230 V - 50 Hz)
<i>Regelung FDA Medizinprodukte</i>	21CFR Part 864.9700, Klasse II (modelle: 220 V - 60 Hz)
<i>Zertifikat cCSAus</i>	Ja (modelle: 220 V - 60 Hz)
<i>Reinraumklasse ISO 14644-1</i>	Klasse 5

„STABLE RUNNING (TEMPERATURSTABILITÄT)“ EXEMPLARISCH

Für alle Modelle sind Temperaturverteilungskurven für die Phasen „Cool Down (Abkühlung)“, „Stable Running (Temperaturstabilität)“ und „Hold Over (Temperaturkurven z. B. bei Stromausfall)“ auf Anfrage für verschiedene Spannungen verfügbar. Ermittelt an 5 Messpunkten pro Etage bzw. Facheinteilung (im unbeladenen Zustand).

U401

Betriebsspannung: 230V / 50Hz


Set point: -82°C

Umgebungstemperatur: $+25^\circ\text{C}$

Kaltalarm: -87°C

Relative Feuchtigkeit: 45%

Warmalarm: -77°C

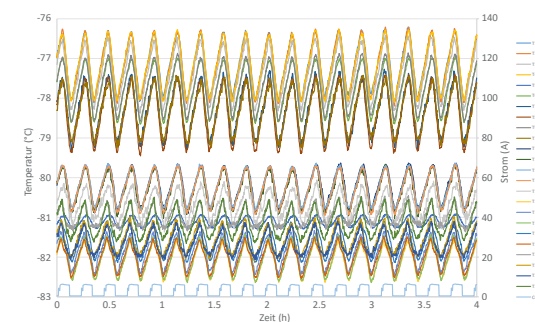



Ausstattung Allgemeine




7-ZOLL-
TOUCHSCREEN-
ANZEIGE



ERGONO-
MISCHER
TÜRGRIFF



SEPARATE
INNENTÜREN
Ebenfalls erhältlich
mit 4 Separate
Innentüren

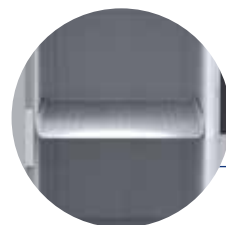

ST-
GITTERROST
(ST = EDELSTAHL)

	U201	U401	U501	U701	U901
<i>B Medical Systems Elektronik 7-Zoll-Touchscreen-Anzeige</i>	●	●	●	●	●
<i>Ergonomischer Türgriff Öffnen/Schließen – Robuster Türverschlussmechanismus</i>	●	●	●	●	●
<i>Integriertes druckentlastungsventil</i>	●	●	●	●	●
<i>Separate Innentüren zur Minimierung von Kälteverlusten</i>	● 1	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4	● 2 ○ 4
<i>ST-Gitterrost</i>	● 1	● 3	● 3	● 3	● 3
<i>Ethernet Schnittstelle</i>	●	●	●	●	●
<i>*B Connected - Überwachungssoftware</i>	○	○	○	○	○
<i>Integriertes Gerät zur Fernüberwachung der Temperatur (RTMD)</i>	●	●	●	●	●
<i>Umgebungstemperatursensor</i>	○	○	○	○	○
<i>Alarmsignal (über potentialfreien Kontakt) bei Stromausfall</i>	●	●	●	●	●
<i>Integriert Anschluss für externen Sensor (Kundenseitigen)</i>	●	●	●	●	●
<i>Wasserkühlung extern</i>	○	○	○	○	○
<i>CO₂ BackUp Notkühlsystem</i>	○	○	○	○	○
<i>Gelenkrollen mit Stabilisatoren</i>	● 4	● 4	● 4	● 4	● 4
<i>Türanschlag (Aufhängung) rechts links</i>	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○



INTEGRIERTES DRUCKENTLASTUNGSVENTIL

Dieser Druckguss-Griff aus Aluminium bietet ein robustes und ergonomisches Handling, mit dem die Tür einhändig geöffnet und gleichzeitig der Druckunterschied im Inneren der Ultra-Tiefkühlschränke ausgeglichen werden kann. Diese Änderung der Position des Vakuumentlastungsventils ermöglicht eine einfache Reinigung des selbigen.


Der Griff besitzt eine elektrische Verriegelung, die man über das Display deaktivieren kann.

● Standard ○ Optional - Nicht verfügbar

Änderungen - ohne vorherige Ankündigung - vorbehalten.




Ausstattung Zubehör

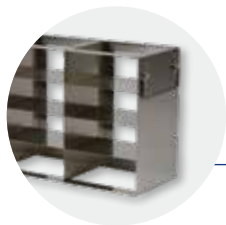


KRYO-RACK

Erhältlich
für Kryo-Boxen
H50 / H75 / H100

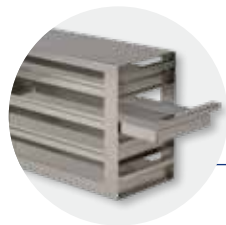

D-RACK

Erhältlich
für Kryo-Boxen
H50 / H75 / H100

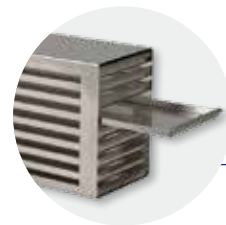

**D-RACK
MIKROTITER**



**KARTON-
KRYO-BOX**

(zeigt mit
Separator aus Karton)

	U201	U401	U501	U701	U901
Groß Kryo-Rack H50 für die Lagerung von 30 Kryo-Boxen H50	-	○ 9 (Max. pro Modell)	○ 12 (Max. pro Modell)	○ 15 (Max. pro Modell)	○ 18 (Max. pro Modell)
Kryo-Rack H50 / H75 / H100 für die Lagerung von 25 Kryo-Boxen H50 / 15x H75 / 10x H100	○ 6 (Max. pro Modell)	○ 12 (Max. pro Modell)	○ 16 (Max. pro Modell)	○ 20 (Max. pro Modell)	○ 24 (Max. pro Modell)
D-Rack H50 / H75 / H100 für die Lagerung von 20 Kryo-Boxen H50 / 15x H75 / 10x H100	○ 6 (Max. pro Modell)	○ 12 (Max. pro Modell)	○ 16 (Max. pro Modell)	○ 20 (Max. pro Modell)	○ 24 (Max. pro Modell)
D-Rack Mikrotiter H22	○ 6 (Max. pro Modell)	○ 12 (Max. pro Modell)	○ 16 (Max. pro Modell)	○ 20 (Max. pro Modell)	○ 24 (Max. pro Modell)
Karton- Kryo-Box*	-	○ 345 (Mit 9 große Kryo-Racks und 3 Kryo-Racks)	○ 460 (Mit 12 große Kryo-Racks und 4 Kryo-Racks)	○ 575 (Mit 15 große Kryo-Racks und 5 Kryo-Racks)	○ 690 (Mit 18 große Kryo-Racks und 6 Kryo-Racks)
	H50 (H 50 x B 136 x T 136 mm)	○ 170 (Mit 6 Kryo-Racks)	○ 345 (Mit 12 Kryo-Racks)	○ 460 (Mit 16 Kryo-Racks)	○ 575 (Mit 20 Kryo-Racks)
	H75 (H 75 x B 136 x T 136 mm)	○ 170 (Mit 6 D-Racks)	○ 320 (Mit 12 D-Racks)	○ 430 (Mit 16 D-Racks)	○ 545 (Mit 20 D-Racks)
	H100 (H 100 x B 136 x T 136 mm)	○ 90 (Mit 6 Kryo-/ D-Racks)	○ 180 (Mit 12 Kryo-/ D-Racks)	○ 240 (Mit 16 Kryo-/ D-Racks)	○ 300 (Mit 20 Kryo-/ D-Racks)
Separator aus Karton für Kryo-Boxen H50 / H75 / H100	○ 6 (Max. pro Modell)	○ 12 (Max. pro Modell)	○ 16 (Max. pro Modell)	○ 20 (Max. pro Modell)	○ 24 (Max. pro Modell)
S-Rack (H 100 x B 113 x T 638 mm) für die Lagerung von Beuteln	○	○	○	○	○
Separator für S-Rack zum Erleichtern der Handhabung und Organisation von Beuteln	○	○	○	○	○
Temperaturschreiber aufgebaut (als Kreisblattrundschreiber)	○	○	○	○	○




VIELSEITIGES MODULARSYSTEM

Herausragende Lagerkapazitäten
und Modularität - Große Auswahl an
Racks für jeden Anspruch.



S-RACK

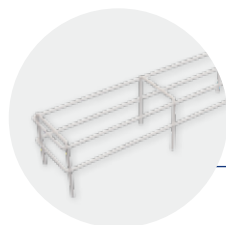

**SEPARATOR
FÜR S-RACK**



**TEMPERATUR-
SCHREIBER**
(Beispielbild)

○ Optional

Alle Funktionen auf einem Blick

B Medical Systems | Elektronik

Die B Medical Systems Elektronik bietet umfangreiche Einstellungs- und Diagnosemöglichkeiten sowie zusätzliche Sicherungs-/Warnfunktionen (über externe Alarmfunktionen, Historien und individuelle Displayanzeigen).

PREMIUM LINE | Multifunktionselektronik mit 7-Zoll-Touchscreen-Anzeige, auf optimaler Höhe in den Türgriff installiert und mit vorinstallierter Verbindung für exklusive °B Connected-Überwachungsfunktionen.



● Hauptschalter 0 = AUS / 1 = EIN

- Zum Einschalten den EIN/AUS-Schalter 1 Sekunde lang gedrückt halten. Die grüne LED leuchtet auf
- Passwortgeschützter Abschaltschutz. Die Tür wird vor dem Abschalten automatisch entriegelt



● 7-Zoll-Touchscreen-Komplettanzeige

Im Normalbetrieb zeigt die Digitalanzeige:

- Oben: Aktuelle Spannung, aktuelle Zeit, Türrahmenheizung und Login-Status (Benutzerebene)
- Linke Seite: Temperatur des Regelsensors (Die Anzeige dieser Temperatur kann in den Einstellungen deaktiviert werden) und Innentemperatur. Die Temperaturwerte werden in °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) in 0.1°-Schritten angezeigt
- Rechte Seite: Schaltflächen zum Zugriff auf das Türentriegelungs-, Reinigungs-, Menü-, Alarm-Stumm- und Nachrichtenfunktionen



● USB-Anschluss und SD-Karten-Steckplatz

● Akustisches und optisches Alarmsignal

Im Falle eines Alarms leuchtet die rote Alarm-LED auf und ein akustisches Signal ertönt. Die entsprechende Alarmmeldung erscheint zusammen mit der gemessenen Innentemperatur auf dem Display. Falls mehrere Alarme gleichzeitig auftreten, werden die Meldungen im Wechsel angezeigt.



● Lesegerät Schlüsselkarte

Login / entsperren mit einer NFC Karte

● Schaltflächen

- TÜRENTRIEGELUNGS-Taste: Entriegelt die Tür des Geräts
- REINIGUNGS-Taste: Die Reinigungsschaltfläche ermöglicht es dem Benutzer, die Berührungsfunktion des Bildschirms für einen kurzen Zeitraum zu deaktivieren, um den Bildschirm zu reinigen. Diese Schaltfläche wird durch die Abmeldeschaltfläche ersetzt, falls ein Benutzer angemeldet ist
- MENÜ-Taste: Ermöglicht den Zugriff auf die Menüanzeige
- ALARM-STUMM-Taste: Deaktiviert den akustischen Alarm für eine voreingestellte Zeitspanne
- ALARM- und WARNUNG-Taste: Während einer Warnung oder in einer Alarmsituation ändert sich die Farbe dieser Schaltfläche und der entsprechenden Ebene. Information zu einem aktiven Alarm und einer Warnung ist durch Berühren der Nachrichten-Schaltfläche verfügbar



Für optimale Kontrolle und Schutz

B Medical Systems | °B Connected & RTMD



°B CONNECTED | ÜBERWACHUNGSSOFTWARE

Universalsoftware zur Überwachung von Kühlgeräten, einschließlich der Erfassung, Aufzeichnung und Darstellung von Temperaturdaten.



- Einzigartige Überwachungssoftware für alle Kühlgeräte „Blood Management Solutions“ und „Medical Refrigeration“
- Webbasierte Schnittstellen für Computer und mobile Geräte
- Modernes Design für eine benutzerfreundliche und intuitive Verwendung
- Grafische Darstellung von Temperaturkurven
- Integrierter Ereignis- und Aktivitätsverlauf von Gerätekompontenten
- Datenaufzeichnung in einer zentralisierten Datenbank zur langfristigen Archivierung
- Einfache Konfiguration von spezifischen Alarmweiterleitungen per E-Mail oder SMS
- Erstellen von Berichten mit wichtigen Daten und Aktivitäten
- Export von Temperatur und detaillierten Gerätedaten für Softwarelösungen von Fremdherstellern
- Hoher Preisvorteil im Vergleich zu einem traditionellen Kreisblattrundschreiber und seinen Ersatzteilen
- REST-API zum direkten Zugriff auf Rohdaten aus der Datenbank nur im Lesemodus

VORTEILE:

- Einzigartige Schnittstelle zur Überwachung aller Kühlgeräte
- Zentralisierte Datenbank mit Datenzugriff auf das gesamte Kundennetzwerk

1 KONFIGURATION




BENUTZER- VERWALTUNG

- Passwort-Login
- Zugriffsrecht



GERÄTE- EINSTELLUNGEN

- Geräte-
informationen
- Geräte- und
Benutzerkonfiguration

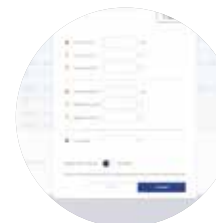

ALARMPROFIL

- Alarmprofil-
parameter
(Tag, Stunde, Minute)
- Alarmverwaltung

2 ANZEIGE



DETAILLIERTE ANZEIGE

- Optimiertes Design für mobile und Touchscreen kompatible Geräte
- Unterstützt mehrere Sprachen
- Echtzeitdaten: Aktuelle Temperaturen, Sollwert, oberer und unterer Grenzwert, Türstatus, Kompressorlaufzeit
- Protokolldaten: Ereignisse, Alarmer innerhalb von Datum/Zeit, Ereignisart, Beschreibung des Ereignisses. Funktion zur Bestätigung von Ereignis und Alarm
- Parametereinstellung für jedes Gerät: Werkseinstellungen, Echtzeituhr, Sprache, Firmware-Version, RS485-Adresse, IP-Adresse

°B Connected und RTMD bieten Ihnen ein hochflexibles System, das an spezielle Kundenanforderungen angepasst werden kann

- > Lückenlose & rechtssichere Temperaturwertdokumentation
- > Umfangreiche Diagnose- und Einsatzmöglichkeiten

3 AUSWERTUNG




ECHTZEIT- GRAFIKEN

- Grafik des Temperaturverlaufs (in Echtzeit)
- Anpassbare Zeitachse
- Offline-Navigation




ÜBERWACHUNGS- ZENTRALE

- Übersicht (Kontrollbildschirm) über alle überwachten Anwendungen:
- Informationen zu: Status, Anwendungsname, Speicherort, Verbindung, oberer und unterer Grenzwert, aktuelle Temperatur, Ereignisse / Alarme
- Dashboard-Funktion zur kombinierten Darstellung verschiedener Temperaturmesswerte in einer einzigen Grafik

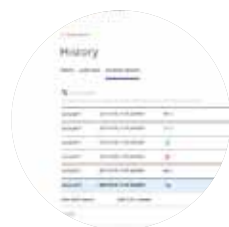

INTERAKTIVE ANALYSE

- Keine Beschränkung der Zeitspanne
- Frei skalierbar
- Detaillierte Daten für jeden Zeitpunkt
- Temperaturdaten, Ereignisse und Alarme
- Login-Historie und Prüfprotokolle

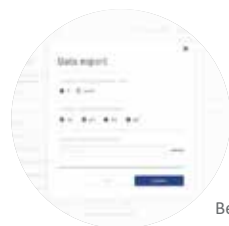

ANALYSE- DRUCKVERSION

- Ausdruck von individuell anpassbaren Berichten auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis
- Export in verschiedene Dateitypen
- Standardformat

RTMD | INTEGRIERTES GERÄT ZUR FERNÜBERWACHUNG DER TEMPERATUR

Das Hardwaremodul überwacht alle Betriebsbedingungen und leitet sie über unser webbasiertes Vaclog-Netzwerk weiter, um eine leistungsstarke und zuverlässige Kühlkette rund um die Uhr zu gewährleisten.

- Echtzeitüberwachung von Temperatur(en), Deckelöffnungen und GPS-Position
- Enthält einen SIM-Chip mit vorausbezahlter Kommunikation für die Dauer der Garanzzeit vertraglich vereinbart
- Entscheidend für die Qualitätsüberwachung der Kühlkette und die Überwachung von Impfstoffen
- Wiederaufladbare Batterie
- Weltweite Fernüberwachung und Datenzugriff über WEB
- Für den Betrieb ist nur eine GSM-Netzabdeckung erforderlich
- Google Maps-Positionierung mit integriertem GPS-Modul
- Zu den Alarmen gehören Temperaturabweichungen und Deckelöffnungen
- Alarme werden per SMS oder E-Mail gesendet





Blood Management Solutions

Sicheres globales Blutmanagement: von der Blutspende bis hin zu Transfusion, Transport, Verarbeitung und Lagerung



Vaccine Cold Chain

Zuverlässige Lösungen zur Aufbewahrung und zum Transport von Impfstoffen weltweit



Medical Refrigeration

Modernste Technologien für höchste und spezifische Ansprüche der Medizinbranche



Kundendienst und -service

Wir sind stets bestrebt, Ihnen den höchsten Service-Standard zu bieten. Dafür sorgen nicht nur unsere ausgewählten Vertriebshändler und Service- und Wartungspartner, sondern auch unser Kundendienstteam. Dieses werksbasierte Ingenieur-Team steht bereit, um unsere Partner oder Sie selbst dabei zu unterstützen, die beste Lösung für Ihre Anforderungen an eine Kühlung zu finden.



medical systems

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems (früher Dometic Medical Systems) verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Medizinkühlung.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1979 unter dem ursprünglichen Firmennamen Electrolux Medical Systems gegründet, als die Weltgesundheitsorganisation die Firma Electrolux in Vianden, Luxemburg mit der Entwicklung einer Lösung beauftragte, um Impfstoffe sicher in der ganzen Welt zu lagern und zu transportieren. Im Jahr 2001 wurde Electrolux Medical Systems Teil der Dometic Group und in Dometic Medical Systems umbenannt. Im Jahr 2015 wurde das Unternehmen nach einem Management-Buyout in B Medical Systems umbenannt.

B Medical Systems S.à r.l.

17, op der Hei
L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Tel.: (+352) 92 07 31-1
Fax: (+352) 92 07 31-300
info@bmedicalsyste.ms.com



www.bmedicalsyste.ms.com

WE SUPPORT



Seit 2019 engagiert sich B Medical Systems für die Corporate Responsibility-Initiative des UN Global Compact und deren Grundsätze in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.

Luxemburg, im Herzen Europas

