



medical
systems

SAVING LIVES
THROUGH RELIABLE
AND INNOVATIVE
TECHNOLOGY

Vaccine Cold Chain





Vaccine Cold Chain

Conjunto completo de sistemas de almacenamiento y transporte pasivos / activos para el conservación y distribución de vacunas y preparados, sujetos en general a cadena de frío en duras condiciones climáticas y técnicas.



Saving lives through reliable and innovative technology*

PARA ENTENDER LAS NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SE REQUIERE DE UN DIÁLOGO CONSTANTE.

Los desafíos médicos que nuestros socios y clientes enfrentan en la práctica pueden ser apabullantes. Involucrarnos continuamente con ellos y recopilar ideas a través del diálogo y el intercambio nos permite comprender la evolución de sus necesidades. Como protagonista global clave en el sector de la tecnología médica, B Medical Systems se compromete a ofrecer dispositivos altamente especializados y de vanguardia que superen constantemente las expectativas.

EL DISEÑO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONFIABLES ES PARTE ESENCIAL DE NUESTRO PROCESO DE INNOVACIÓN.

Nos sentimos estrechamente conectados con la comunidad internacional de profesionales de la salud y utilizamos procesos industriales optimizados para ofrecer productos y servicios confiables que ayuden a desarrollar una relación de confianza. Mediante la gestión de los elementos de diseño, fabricación, distribución y posventa adoptamos un enfoque que abarca todo el ciclo vital y podemos asegurar que el costo total de propiedad de nuestros productos es el más bajo posible.

PONER A LAS PERSONAS EN PRIMER LUGAR COMIENZA EN NUESTRA ORGANIZACIÓN.

Adoptamos un enfoque orientado al cliente en todo lo que hacemos y nos rigen nuestros valores y elevados estándares. Nuestro equipo de profesionales altamente calificados comparte nuestro deseo de sobresalir y mantenernos a la vanguardia en el sector de la innovación tecnológica. Como organización, nuestro objetivo central es salvar vidas mediante tecnología confiable e innovadora.

SOLUCIONES CONFIABLES PARA UNA VACUNACIÓN SEGURA ALREDEDOR DEL MUNDO.

B Medical Systems es un fabricante líder de equipos de cadena de frío para campañas de vacunación a gran escala en mercados emergentes. Trabajamos en estrecha colaboración con organismos públicos de salud, gobiernos nacionales y organizaciones multilaterales para respaldar el éxito de sus campañas de vacunación.

SUMARIO

- 02-03** Vaccine Cold Chain
- 04-17** Refrigeradores y congeladores Solar Direct Drive
¡Para un despliegue rápido y una solución fiable para conservar vacunas o medicamentos en condiciones de aislamiento extremo en todo el mundo!
- 18-23** Refrigeradores y congeladores Iceliners
Para uso en condiciones exigentes como ambientes calurosos y húmedos
- 24-27** Cajas de transporte para vacunas
Para el transporte de vacunas desde los diferentes centros de almacenamiento hasta los lugares de aplicación
- 28-30** Congeladores de temperatura ultrabaja
para almacenar componentes sanguíneos y plasma sanguíneo, células humanas, tejidos, vacunas con virus vivo y otras muestras de laboratorio a temperaturas ultrabajas de hasta -86°C

Una línea completa para una cadena de frío eficiente

Vaccine Cold Chain

Refrigeradores y congeladores Solar Direct Drive

GAMA SDD



Ultra 16 SDD



TCW 15 SDD / TCW 15R SDD



TCW 40 SDD / TCW 40R SDD



TFW 40 SDD



TCW 80 SDD



TCW 120 SDD



TCW 2000 SDD / TCW 2043 SDD



TCW 3000 SDD / TCW 3043 SDD



TCW 4000 SDD

Almacenamiento de vacunas (l)	16	16	16	36	36	-	80.5	120	99	70	156	89	220
Almacenamiento de icepacks*	-	4 x 0.6 L	-	3.6 kg	-	11.24 kg	-	22 x 0.6 L	14.4 kg	10.5 kg	-	-	-

Refrigeradores y congeladores Iceliners

GAMA AC



TCW 40R AC



TCW 80 AC



TCW 120 AC



TFW 3000 AC



TCW 4000 AC

Almacenamiento de vacunas (l)	36	81	120	-	240
Almacenamiento de icepacks	-	-	22 x 0.6 L	162 x 0.6 L	-

Cajas de transporte para vacunas

GAMA PASIVA



RCW1



RCW2



RCW4



RCW8



RCW12




RCW25

Volumen bruto (l)	6.5	1.9	8	20	24	44
Almacenamiento de vacunas (l)	1.04	0.92	3	6	7	20

Congeladores de temperatura ultrabaja

GAMA U

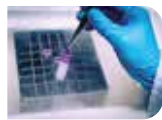

U201



U401 & U401 V**



U501 & U501 V**



U701 & U701 V**



U901

Volumen bruto / neto (l)	232 / 217	478 / 454	634 / 602	791 / 751	949 / 900
Almacenamiento de viales (a 2ml)	17000	34500	46000	57500	69000
Almacenamiento de cryoboxes*	170 (modelo H50)	345 (modelo H50)	460 (modelo H50)	575 (modelo H50)	690 (modelo H50)

*1 Solamente a título indicativo. *2 V significa tecnología de refrigeración de velocidad variable.
Reservado el derecho de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones muestran a veces accesorios opcionales.


Refrigeradores y congeladores Solar Direct Drive

B Medical Systems | Gama SDD

13 modelos • Almacenamiento de vacunas 16 > 220 L

¡Para un despliegue rápido y una solución fiable para conservar vacunas o medicamentos en condiciones de aislamiento extremo en todo el mundo!

La solución Solar Direct Drive consta de varios refrigeradores de vacunas y congeladores de icepacks que funcionan directamente con paneles solares, sin la necesidad de baterías ni reguladores. Esta solución ofrece una cadena de frío confiable para vacunas de importancia vital, aún en las zonas más remotas. ¡La solución Solar Direct Drive utiliza la fuente de energía que nunca se agota: nuestro sol!

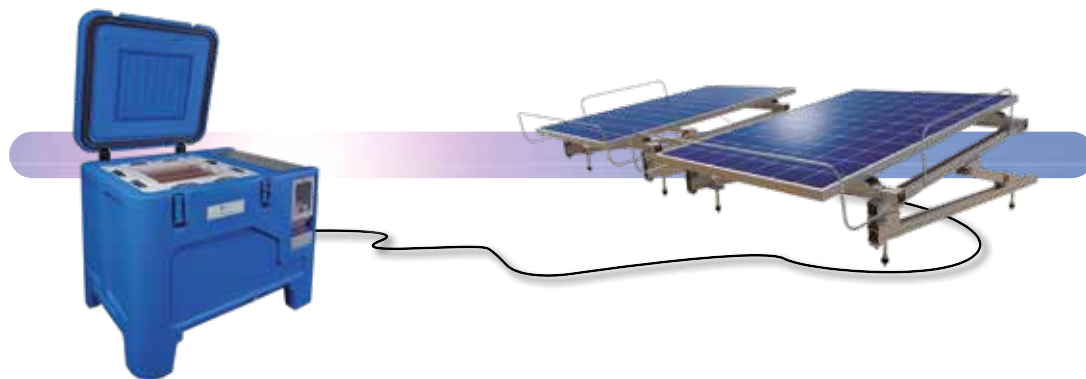

Los refrigeradores Vaccine Cold Chain Solar Direct Drive (SDD) de B Medical Systems proporcionan un rendimiento mejorado y alta confiabilidad, lo que lleva a un desperdicio de vacunas más bajo de forma sostenible.



RTMD | Dispositivo de monitoreo remoto de temperatura (integrado*)



- Registrador de temperatura para el monitoreo en tiempo real
- Incluye chip SIM con comunicación prepaga durante el período de garantía acordado contractualmente
- Crucial para la vigilancia de la cadena de frío y el monitoreo de vacunas
- Batería recargable
- Monitoreo remoto a nivel mundial y acceso a la información a través de la WEB
- La cobertura de red 2G/3G/4G es necesaria para operar
- Posicionamiento en mapas de Google usando el módulo GPS integrado
- Las alarmas incluyen desviaciones en las temperaturas y aperturas de tapas
- Las alarmas se envían por mensajes de SMS o E mail
- Funciona con corriente alterna (CA) y fotovoltaica (SDD)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LOS PRODUCTOS?

El desarrollo de un producto exitoso y seguro debe cumplir con una serie de parámetros definidos, los más importantes de los cuales son:

- **Hold over time (tiempo de mantenimiento):** Tiempo en horas durante el cual todos los puntos del compartimento de vacunas permanecen entre +2°C y +8°C, a la máxima temperatura ambiente para la zona de temperatura que está clasificado el aparato, una vez que el suministro de energía ha sido desconectado
- **Cold life (Vida Fría):** La vida fría se mide desde el momento en que la tapa del recipiente se cierra hasta que la temperatura del punto más cálido en el compartimiento de almacenamiento de la vacuna alcanza primero los +10°C (después de enfriarse por debajo de +10°C durante el tiempo de enfriamiento), a una prueba de temperatura ambiente constante de +43°C
- **Autonomía:** Tiempo en días que el refrigerador solar o congelador combinado refrigerador-icepack, puede mantener la carga de vacunas dentro de un rango aceptable de temperatura en condiciones de baja radiación solar (por ej.: lluvia)

Variaciones de generadores solares (opcionales)



G1 Paneles solares (instalación en el techo)

2 paneles solares (200W / 25V) para instalación fija de techo. Esta solución es fácil de instalar e ideal para altos niveles de radiación solar. G1 está equipado con un sistema antirrobo. Instalación a realizar por agentes certificados de B Medical Systems.



KIT DE HERRAMIENTAS BASIC (opción)

Consiste de diferentes herramientas básicas como llaves, desarmadores, lápiz, cinta métrica y transportador



G2 Paneles solares ajustables (instalación en el techo o en suelo)

2 paneles solares ajustables (200W / 25V) para instalación reclinable de techo. Esta solución optimiza la captación de energía y permite el posicionamiento en cualquier lugar. G2 está equipado con un sistema antirrobo. Instalación a realizar por agentes certificados de B Medical Systems.



KIT DE HERRAMIENTAS PREMIUM (opción)

Incluye el "Kit de herramientas BASIC" y un taladro para fijar el generador solar al techo, pared o poste

→ También disponible como versión poste o pared.

* Condiciones se aplican.

Refrigerador de vacunas

B Medical Systems | Gama SDD



El Ultra 16 SDD es un refrigerador de vacunas de 16 L para períodos prolongados de mal tiempo.



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Paneles aislados al vacío y espuma de poliuretano
 - La tapa de nuevo diseño con cierre empotrado evita la pérdida de aire frío
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas con gran autonomía

- Almacenamiento de vacunas: 16 L
 - Autonomía: 477 h 56 a +43°C
- Incluye 2 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



● Electrónica integrada

- Control electrónico con monitoreo de temperatura digital LED y dos puertos USB para carga de teléfono celular, tablet y otros dispositivos
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)



● Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos "plug and play": de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere solo 1 generador solar (2 paneles solares 200W / 25V)



● Dispositivo de uso amigable

Dispositivo provisto de compartimento con puerta con cerradura y 2 espacios de almacenamiento para celulares, tabletas y otros dispositivos



Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks*

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 15 SDD es una combinación de un refrigerador para vacunas y medicamentos, y un congelador para icepacks.



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
 - Triple sello de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
 - Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas con porta-paquetes de icepacks

- Almacenamiento de vacunas: 16 L
 - Autonomía: 84 h a +43°C
- Equipado con 4 porta-paquetes de icepacks para el almacenamiento rápido de 4 icepacks a 0.6 L
- Incluye 2 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas
- Drenaje de evaporación de agua automático



● Electrónica integrada

- Control electrónico, en un nivel accesible sobre la tapa, con monitor digital LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)



● Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos "plug and play": de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere solo 1 generador solar (2 paneles solares 200W / 25V)



Este dispositivo también está disponible en



TCW 15R SDD | Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 16 L
- Autonomía: 81 h 52 a +43°C
- Hold over time: 87 h 48 a +43°C



“ En mi experiencia, el 50-75% de los problemas para llegar al “5ºhijo” podrían resolverse mediante mejoras en la cadena de frío. ”

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks*

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 40 SDD es una combinación de un refrigerador para vacunas y medicamentos, y un congelador para icepacks.



Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Triple sello de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



Refrigerador de vacunas de porta-paquetes de icepacks

- Almacenamiento de vacunas: 36 L
 - Autonomía: 81 h 54 a +43°C
 - Hold over time: 93 h 24 a +43°C
- Equipado con 8 porta-paquetes de icepacks para el almacenamiento rápido de 8 icepacks a 0.6 L
- Incluye 1 cesta de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)




Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos "plug and play": de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere solo 1 generador solar (2 paneles solares 200W / 25V)



Este dispositivo también está disponible en

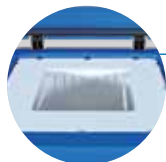

TCW 40R SDD | Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 36 L
- Autonomía: 81 h 54 a +43°C
- Hold over time: 93 h 24 a +43°C



TFW 40 SDD | Congelador de icepacks

- Almacenamiento de icepacks: 11.24 kg (20 waterpacks)
- Capacidad de congelación de icepacks: 2.16 kg / 24 h a +43°C
- Autonomía: 120 h a +43°C



Refrigerador de vacunas

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 80 SDD es un refrigerador para vacunas y medicamentos.



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 80.5 L
 - Autonomía: 72 h 21 a +43°C
- Incluye 4 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)



● Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos "plug and play": de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere solo 1 generador solar (2 paneles solares 200W / 25V)



" Ghana 2013: Cerca de 40% de los refrigeradores y congeladores tienen más de 10 años, 25% no funcionan. También tienen **frecuentes descomposturas debido a la pobre cultura de mantenimiento y al errático suministro de energía.** "

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks*

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 120 SDD es una combinación de un refrigerador para vacunas y medicamentos, y un congelador para icepacks.



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks

- Almacenamiento de vacunas: 120 L
- Almacenamiento de icepacks: 22 x 0.6 L
- Capacidad de congelación de icepacks: >1.6 kg / 24 h a +43°C
 - Autonomía: 82 h 05 a +43°C
 - Hold over time: 82 h 05 a +43°C
- Incluye 22 icepacks a 0.6 L y 4 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)
- Punto de consigna predeterminada de +5°C (refrigerador) y -20°C (congelador) (no puede ser modificada por el usuario)



● Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos "plug and play": de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere 2 generadores solares (4 paneles solares 200W / 25V)



Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks*

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 2000 SDD está equipado de doble compartimento, con refrigerador para vacunas y medicamentos, y congelador para icepacks con dos sistemas de enfriamiento.



Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 4 cierres aseguran un sello hermético



Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks

- Almacenamiento de vacunas: 99 L
- Almacenamiento de icepacks: 14.4 kg
- Capacidad de congelación de icepacks: 2.4 kg / 24 h a +32°C
 - Autonomía: 85 h 24 a +32°C
 - Hold over time: 100 h a +32°C
- Incluye 16 icepacks a 0.6 L y 4 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



Electrónica integrada

- 2 controladores electrónicos digitales de temperatura integrados
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología “verde”: muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)



Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos “plug and play”: de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere 2 generadores solares (4 paneles solares 200W / 25V)



Este dispositivo está disponible para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C

TCW 2043 SDD | Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks

- Almacenamiento de vacunas: 70 L
- Almacenamiento de icepacks: 10.5 kg
- Capacidad de congelación de icepacks: 2.5 kg / 24 h a +43°C
- Autonomía: 73 h 54 a +43°C
- Hold over time: 79 h a +43°C
- Incluye 2 cestas de almacenaje

Refrigerador de vacunas

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 3000 SDD es un refrigerador de vacunas y medicamentos de gran capacidad.



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético



● Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 156 L
 - Autonomía: 86 h 56 a +32°C
 - Hold over time: 94 h 05 a +32°C
 - Incluye 5 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital de temperatura integrada
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología “verde”: muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)



● Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos “plug and play”: de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere solo 1 generador solar (2 paneles solares 200W / 25V)



Este dispositivo está disponible para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C

TCW 3043 SDD | Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 89 L
- Autonomía: 116 h 41 a +43°C
- Hold over time: 124 h 48 a +43°C
- Incluye 5 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas

Refrigerador de vacunas

B Medical Systems | Gama SDD



El TCW 4000 SDD es el más grande refrigerador solar direct drive del mundo, con capacidad neta de almacenar hasta 220 L de vacunas.



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 220 L
 - Autonomía: 91 h 16 a +43°C
- Incluye 6 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas
- Equipado con el nuevo sistema de evaporación automática de agua




● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)
- Punto de consigna predeterminada de +5°C (no puede ser modificada por el usuario)



● Instalación Plug & Play

- ¡Conectores rápidos "plug and play": de una sola vía!
- Funciona directamente con paneles solares, sin baterías ni regulador (longitud del cable: 25 metros por generador)
- Requiere solo 1 generador solar (2 paneles solares 200W / 25V)

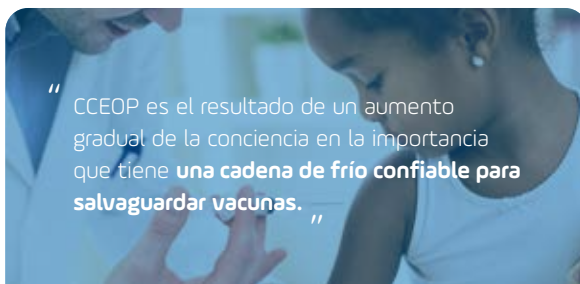

“ CCEOP es el resultado de un aumento gradual de la conciencia en la importancia que tiene **una cadena de frío confiable para salvaguardar vacunas.** ”

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Sistema de recolección de energía

B Medical Systems | Gama SDD



El Kit para Centro de Salud, es el sistema de recolección de energía que carga automáticamente una batería con el exceso de energía disponible proveniente de nuestros generadores solares.



● Instalación Plug & Play

Permite vincular los refrigeradores SDD y los generadores solares con el conector rápido "plug and play", ¡de una sola vía!



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico con administración automática de energía y permite alimentar dispositivos eléctricos esenciales que operen con corriente directa

- Interfaces de conexión: 2 salidas USB (5W cada una) y 1 enchufe para encendedor de cigarrillos (20W)

- Batería 27Ah recargable (ciclo de vida de 5 años)



● Diseñado para uso intensivo

- Unidad independiente fabricada en polietileno rotomoldeado (Extremadamente robusto para uso intensivo y móvil)
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Protección Anti-Robo

● Dispositivo de uso amigable

- 2 Luces LED Recargables para uso móvil
- Dispositivo provisto de compartimento con puerta con cerradura y 2 espacios de almacenamiento para celulares, tabletas y otros dispositivos
- Ventilador de techo móvil



El kit para centro de salud es un dispositivo destinado a **detectar el exceso de energía producida por un generador solar**, cambiando sus salidas para controlar dispositivos pequeños con voltaje DC. **Una batería integrada** brinda la posibilidad de **almacenar energía y cargar dispositivos también durante la noche.**





Datos técnicos

Solar Direct Drive



Ultra 16 SDD

TCW 15 SDD

TCW 15R SDD

TCW 40 SDD

TCW 40R SDD

		Ultra 16 SDD	TCW 15 SDD	TCW 15R SDD	TCW 40 SDD	TCW 40R SDD
<i>Función</i>		Refrigerador de vacunas	Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks	Refrigerador de vacunas	Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks	Refrigerador de vacunas
<i>Zona climática</i>		Zona tórrida (+43°C)				
<i>Almacenamiento de vacunas (l)</i>			16			36
<i>Almacenamiento de icepacks</i>		-	4 x 0.6 L (porta-paquetes de icepacks)	-	3.6 kg	-
<i>Capacidad de congelación de icepacks</i>		-	1.97 kg / 24 h	-	1.89 kg / 24 h	-
<i>Autonomía (estándar de la OMS)</i>		477 h 56	84 h	81 h 52	81 h 54	81 h 54
<i>Hold over time (+2°C a +10°C)</i>		-	-	87 h 48	93 h 24	93 h 24
<i>Tiempo de enfriamiento</i>		312 h	35 h	36 h	36 h	36 h
<i>Dimensiones al x an x fo (mm)</i>	<i>Exteriores</i>	1120 x 840 x 780		950 x 730 x 730		900 x 1030 x 780
	<i>Envío</i>	1260 x 940 x 878		1088 x 770 x 778		1060 x 1040 x 800
<i>Peso del envío (kg)</i>		196	95	94	126	129
<i>Número recomendado de paneles solares</i>		2 x 200 W / 25 V				
<i>Consumo de energía / 24 h</i>	<i>Funcionamiento estable</i>	0.34 kWh	0.49 kWh	0.43 kWh	0.57 kWh	0.57 kWh
	<i>Al enfriar</i>	0.38 kWh	0.50 kWh	0.43 kWh	0.67 kWh	0.67 kWh
	<i>Durante la congelación</i>	-	0.69 kWh	-	0.69 kWh	-
<i>Freeze protection (Protección contra congelación)</i>		Grado A				

Todos los valores fueron medidos a +32°C o 43°C de acuerdo con la zona climática correspondiente a cada modelo (a menos que se especifique lo contrario). Reservado el derecho de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones muestran a veces accesorios opcionales.

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY



Datos técnicos Solar Direct Drive



TCW 80 SDD TCW 120 SDD TCW 2000 SDD TCW 2043 SDD TFW 40 SDD

<i>Función</i>	Refrigerador de vacunas		Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks		Congelador de icepacks	
<i>Zona climática</i>	Zona tórrida (+43°C)		Zona templada (+32°C)	Zona tórrida (+43°C)		
<i>Almacenamiento de vacunas (l)</i>	80.5	120	99	70	-	
<i>Almacenamiento de icepacks</i>	-	22 x 0.6 L	14.4 kg	10.5 kg	11.24 kg	
<i>Capacidad de congelación de icepacks</i>	-	> 1.6 kg / 24 h	2.4 kg / 24 h	2.5 kg / 24 h	2.16 kg / 24 h	
<i>Autonomía (estándar de la OMS)</i>	72 h 21	82 h 05	85 h 24	73 h 54	120 h	
<i>Hold over time (+2°C a +10°C)</i>	-	82 h 05	100 h	79 h	-	
<i>Tiempo de enfriamiento</i>	192 h	168 h	12 h	56 h	313 h	
<i>Dimensiones al x an x fo (mm)</i>	<i>Exteriores</i>	890 x 1023 x 778	910 x 1620 x 790	910 x 1270 x 780	900 x 1030 x 780	
	<i>Envío</i>	1060 x 1040 x 800	1040 x 1660 x 805	1030 x 1300 x 800	1060 x 1040 x 800	
<i>Peso del envío (kg)</i>	112	187	161	166	119	
<i>Número recomendado de paneles solares</i>	2 x 200 W / 25 V		4 x 200 W / 25 V		2 x 200 W / 25 V	
<i>Consumo de energía / 24 h</i>	<i>Funcionamiento estable</i>	0.60 kWh	1.15 kWh	0.78 kWh	0.73 kWh	0.59 kWh
	<i>Al enfriar</i>	0.58 kWh	1.31 kWh	0.74 kWh	0.79 kWh	0.59 kWh
	<i>Durante la congelación</i>	-	1.38 kWh	0.96 kWh	1.05 kWh	0.64 kWh
<i>Freeze protection (Protección contra congelación)</i>	Grado A			-		



Datos técnicos

Solar Direct Drive



TCW 3000 SDD TCW 3043 SDD TCW 4000 SDD


<i>Función</i>		Refrigerador de vacunas		
<i>Zona climática</i>		Zona temperada (+32°C)	Zona tórrida (+43°C)	
<i>Almacenamiento de vacunas (l)</i>		156	89	220
<i>Autonomía (estándar de la OMS)</i>		86 h 56	116 h 41	91 h 16
<i>Hold over time (+2°C a +10°C)</i>		94 h 05	124 h 48	-
<i>Tiempo de enfriamiento</i>		36 h	145 h	312 h
<i>Dimensiones al x an x fo (mm)</i>	<i>Exteriores</i>	910 x 1270 x 780		915 x 1625 x 780
	<i>Envío</i>	1030 x 1300 x 800		1040 x 1660 x 805
<i>Peso del envío (kg)</i>		140	171	188
<i>Número recomendado de paneles solares</i>		2 x 200 W / 25 V		
<i>Consumo de energía / 24 h</i>	<i>Funcionamiento estable</i>	0.25 KWh	0.68 KWh	0.83 KWh
	<i>Al enfriar</i>	0.34 KWh	0.68 KWh	0.84 KWh
<i>Freeze protection (Protección contra congelación)</i>		Grado A		



Refrigeradores y congeladores Iceliners

B Medical Systems | Gama AC

5 modelos • Almacenamiento de vacunas 36 > 240 L

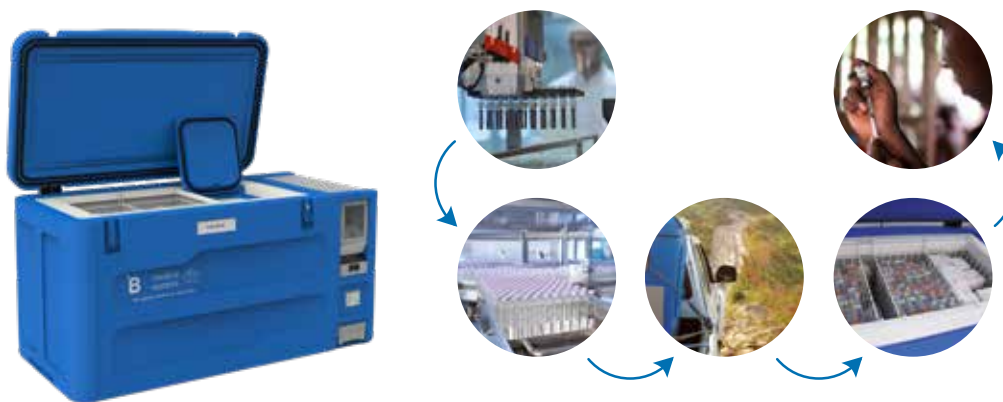

Para uso en condiciones exigentes como ambientes calurosos y húmedos.

Esta gama consta de varios refrigeradores y congeladores “iceliners” para centros nacionales, regionales y urbanos, que poseen un adecuado suministro eléctrico (al menos 8 h / día).

Fabricados de polietileno rotomoldeado, estos modelos están diseñados para poder dar respuesta a las desafiantes condiciones que imponen ambientes húmedos y de altas temperaturas, y ofrecen la durabilidad y robustez para un uso intensivo.

Con el equipo “Vaccine Cold Chain” de B Medical Systems usted se beneficia de dispositivos especializados que combinan eficiencia sobresaliente y bajo TCO. Uno resulta del otro- el acceso a la vacunación que salva vidas depende de un almacenamiento seguro. Es por eso que organizaciones en todo el mundo confían en el equipo robusto de B Medical Systems, por las eficientes campañas de vacunación durante décadas. Estos esfuerzos de UNICEF, WHO (OMS), Gavi, gobiernos y otros, han resultado en salvar millones de vidas alrededor del mundo.

“ Con la introducción de nuevas vacunas, **las fallas comunes de los equipos** - un refrigerador roto o un paquete de hielo con fugas - **pueden producir fácilmente daños por miles de dólares de vacunas.** ”

Refrigerador de vacunas

B Medical Systems | Gama AC



El TCW 80 AC es un refrigerador para vacunas con estabilizador de voltaje integrado y RTMD

> **Un solo dispositivo en todo el mundo para todos los voltajes y frecuencias**



● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 81 L
 - Hold over time: 72 h 09 a +43°C
 - Incluye 4 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)
- Punto de consigna predeterminada de +5°C (no puede ser modificada por el usuario)




● Características especiales

- Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura (RTMD), ofrece monitoreo remoto de temperatura en tiempo real a nivel mundial, acceso a la información a través de la WEB y el módulo GPS
- Solución de estabilización automática de voltaje totalmente integrada (para cualquier voltaje entre 90-290 V) y un relevador de protección
- Equipado con estabilizadores de voltaje innovadores que permiten el uso de este modelo en áreas del mundo con suministro eléctrico inestable
- 5 años de garantía internacional en todas las partes y mano de obra



También disponible

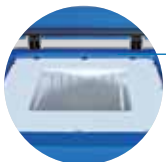

TCW 40R AC | Refrigerador de vacunas


- Almacenamiento de vacunas: 36 L
- Hold over time: 110 h a +43°C
- Incluye 1 cesta de almacenaje

Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks*

B Medical Systems | Gama AC



El TCW 120 AC es un refrigerador de vacunas y congelador de icepacks con estabilizador de voltaje integrado y RTMD > **Un solo dispositivo en todo el mundo para todos los voltajes y frecuencias**

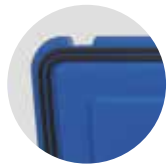

Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks

- Almacenamiento de vacunas: 120 L
- Almacenamiento de icepacks: 22 x 0.6 L
- Capacidad de congelación de icepacks: >1.6 kg / 24 h a +43°C
 - Hold over time: 73 h 54 a +43°C
- Incluye 22 icepacks a 0.6 L y 4 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas



Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)
- Punto de consigna predeterminada de +5°C (refrigerador) y -20°C (congelador) (no puede ser modificada por el usuario)



Características especiales

- Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura (RTMD), ofrece monitoreo remoto de temperatura en tiempo real a nivel mundial, acceso a la información a través de la WEB y el módulo GPS
- Solución de estabilización automática de voltaje totalmente integrada (para cualquier voltaje entre 90-290 V) y un relevador de protección
- Equipado con estabilizadores de voltaje innovadores que permiten el uso de este modelo en áreas del mundo con suministro eléctrico inestable
- 5 años de garantía internacional en todas las partes y mano de obra




Congelador de icepacks*

B Medical Systems | Gama AC



El TFW 3000 AC es el primer congelador rotomoldeado de gran capacidad, diseñado para congelar y almacenar de icepacks en zonas tropicales > **Muy bajo consumo de energía**

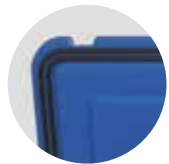

● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C




● Congelador de icepacks

- Almacenamiento de icepacks: 162 x 0.6 L
- Capacidad de congelación de icepacks: 32.4 kg / 24 h a +43°C
 - Incluye 54 icepacks a 0.6 L y 6 cestas de almacenaje



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital de temperatura integrada
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología “verde”: muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R290)
- Punto de consigna predeterminada de -16°C (no puede ser modificada por el usuario)

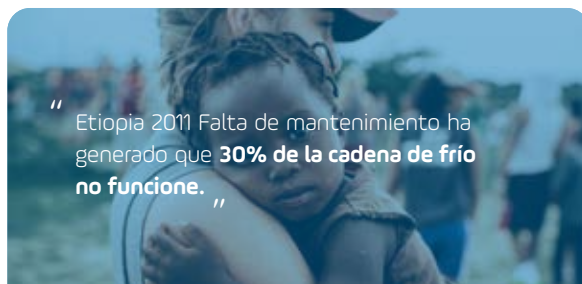

“ Etiopia 2011 Falta de mantenimiento ha generado que **30% de la cadena de frío no funcione.** ”


SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Refrigerador de vacunas

B Medical Systems | Gama AC



El TCW 4000 AC es el más grande refrigerador iceliner rotomoldeado del mundo, con capacidad neta de almacenar hasta 240 L de vacunas > **Muy bajo consumo de energía**

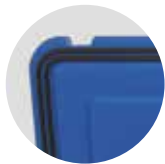

● Máximo valor de aislamiento

- Construcción de cuerpo rotomoldeado: sin corrosión y extremadamente robusto
 - Aislamiento de 100mm de espuma de poliuretano que garantiza un aislamiento eficiente
- Juntas dobles de silicón (reemplazables) y 2 cierres aseguran un sello hermético
- Diseñado para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C



● Refrigerador de vacunas

- Almacenamiento de vacunas: 240 L
 - Hold over time: 77 h 18 a +43°C
 - Incluye 6 cestas de almacenaje: simplifica el manejo y gestión de almacenamiento de vacunas
 - Equipado con el nuevo sistema de evaporación automática de agua



● Electrónica integrada

- Controlador electrónico digital con pantalla LED de temperatura integrada
- Operación sencilla y fácil de "1 solo botón"
- El control de la temperatura se mantiene en períodos de fallas en la alimentación
- Tecnología "verde": muy bajo consumo de energía y refrigerante ecológico (R600a)
- Punto de consigna predeterminada de +5°C (no puede ser modificada por el usuario)



● Características especiales

Se puede comprar con Dispositivo de Monitoreo Remoto de Temperatura (RTMD), ofrece monitoreo remoto de temperatura en tiempo real a nivel mundial, acceso a la información a través de la WEB y el módulo GPS.





Datos técnicos Iceliners



TCW 40R AC

TCW 80 AC

TCW 120 AC

TFW 3000 AC

TCW 4000 AC

		TCW 40R AC	TCW 80 AC	TCW 120 AC	TFW 3000 AC	TCW 4000 AC
<i>Función</i>		Refrigerador de vacunas		Refrigerador de vacunas y congelador de icepacks	Congelador de icepacks	Refrigerador de vacunas
<i>Zona climática</i>		Zona tórrida (+43°C)				
<i>Almacenamiento de vacunas (l)</i>		36	81	120	-	240
<i>Almacenamiento de icepacks</i>		-	-	22 x 0.6 L	162 x 0.6 L	-
<i>Capacidad de congelación de icepacks</i>		-	-	> 1.6 Kg / 24 h	32.4 kg / 24 h	-
<i>Hold over time (+2°C a +10°C)</i>		110 h	72 h 09	73 h 54	-	77 h 18
<i>Dimensiones al x an x fo (mm)</i>	<i>Exteriores</i>	888 x 1022 x 778	892 x 1020 x 783	910 x 1620 x 790	910 x 1270 x 780	915 x 1625 x 780
	<i>Envío</i>	1040 x 1060 x 800		1040 x 1660 x 805	1030 x 1300 x 800	1040 x 1660 x 805
<i>Peso del envío (kg)</i>		126	111	188	126	183
<i>Rango de tensión de funcionamiento</i>		110-240 V - 50/60 Hz			220-240V 50/60Hz o 110-127V 60Hz	220-240V 50/60Hz o 110-120V 60Hz
<i>Consumo de energía / 24 h</i>	<i>Funcionamiento estable</i>	0.51 KWh	0.47 KWh	1.55 KWh	2.15 KWh	0.85 KWh
	<i>Al enfriar</i>	0.76 KWh	0.60 KWh	1.07 KWh	2.20 KWh	1.24 KWh
	<i>Durante la congelación</i>	-	-	1.41 KWh	-	-
<i>Freeze protection (Protección contra congelación)</i>		Grado A				

Todos los valores fueron medidos a +32°C o 43°C de acuerdo con la zona climática correspondiente a cada modelo (a menos que se especifique lo contrario). Reservado el derecho de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones muestran a veces accesorios opcionales.

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Cajas de transporte para vacunas

B Medical Systems | Gama Pasiva

6 modelos • Volumen 1.9 > 44 L • Conforme ADR | RID | IMDG | ICAO-TI | IATA-DGR • En conformidad con las directrices de la OMS | Certificado PQS*



Para el transporte de vacunas desde los diferentes centros de almacenamiento hasta los lugares de aplicación.

Diseñadas para el transporte de vacunas desde los diferentes centros de almacenamiento hasta los lugares de aplicación (centros regionales, de salud o en el transcurso de campañas de vacunación) estas cajas de transporte aseguran una cadena de frío intacta para períodos de transportes entre 24 horas y 8 días.

Esta gama consta de seis sistemas pasivos de transporte y son idóneos para un uso intensivo en muchas operaciones de transporte, incluso en duras condiciones climáticas. Estos modelos están conforme al Convenio Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y ferrocarril (RID), Transporte marítimo (IMDG) y conforme al Convenio Internacional sobre el Transporte Aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (ADR / RID / IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR)

- Convenio Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera (ADR) y ferrocarril (RID), Directiva 2008 / 68 / CE
- Convenio Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por marítimo (IMDG), Directiva 2002 / 84 / CE
- Convenio internacional sobre el transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

Los modelos RCW2/4/12 están autorizados para productos de los grupos de envase I, II y III.

Los modelos RCW8/25 están autorizados para productos de los grupos de envase II y III.

“ Estudios han demostrado que que la cadena de frío en muchos países no es confiable y que **las vacunas están expuestas a temperaturas perjudiciales.** ”



● Diseñadas para uso intensivo

- Estas cajas de transporte especiales, fabricadas a partir de polietileno rotomoldeado (material literalmente indestructible), se componen de una carcasa extraordinariamente resistente y que no experimenta prácticamente deformaciones ante fuerzas exteriores, causadas por ejemplo por impactos y caídas, como ha quedado demostrado en los tests de caída
- Manejo más fácil y seguro, ya que el material libre de corrosión y de peso reducido. Todos los sistemas de transporte pueden limpiarse fácilmente y a fondo, y desinfectarse con desinfectantes convencionales. Su interior no presenta rincones o áreas inaccesibles
- Los cierres pueden precintarse o bien proceder a la utilización de candados, quedando así protegidos contra cualquier acceso no autorizado durante el transporte
- Los modelos RCW1/2/4/8 son muy fáciles de manejar gracias a su correa de hombro ajustable y su peso liviano
- Diseñadas para temperaturas tropicales: +5°C a +43°C

● Características especiales I RCW25

PCM packs - acumuladores térmicos que contienen un denominado material de cambio de fase (PCM a +5°C y -30°C) y hielo seco (a -80°C) están disponibles para un transporte prolongado. De esa manera, el producto almacenado es mantenido a un nivel de temperatura casi constante sin refrigeración activa durante un determinado tiempo.



* Exceptuando el modelo RCW2

● Máximo valor de aislamiento

- La espuma de poliuretano sin CFC ni HCFC inyectada en la doble pared de estos sistemas de transporte garantiza un óptimo aislamiento y la conservación de la calidad de los productos almacenados, sobre todo, con largos intervalos de transporte
- Gracias al propio aislamiento del cuerpo exterior frente al entorno, los sistemas de transporte de B Medical Systems trabajan a temperatura estable incluso con altas temperaturas ambientales

● Características especiales I RCW1

- El RCW1 es un transportador de vacunas para largo alcance, el primero que cumple con las actuales especificaciones de protección contra congelación de la OMS, y está perfectamente adecuado para el transporte de vacunas y viales pre-enfriados. Es fácil de manejar y puede ser cómodamente llevado gracias a su correa de hombro y mochila opcional para largas caminatas o entregas en motocicleta. Un termómetro estándar con pantalla digital integrada informa siempre sobre la temperatura de las vacunas
- Su compartimiento interno de almacenamiento de vacunas y su recipiente para viales con sujetadores (para mantener viales de vacunas abiertos), protege los materiales sensibles a la temperatura contra la congelación y asegura las condiciones óptimas de temperatura



SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY



Datos técnicos

Sistema pasivo



RCW1

RCW2

RCW4

RCW8

RCW12

RCW25


		Pasiva					
		Zona tórrida (+43°C)					
<i>Sistema de refrigeración</i>							
<i>Zona climática</i>							
<i>Volumen bruto (l)</i>		6.5	1.9	8	20	24	44
<i>Almacenamiento de vacunas (l)</i>		1.04	0.92	3	6	7	20
<i>Número de icepacks necesarios (para vacunas)</i>		3 x 0.6 L	2 x 0.3 L	1 x 0.6 L + 6 x 0.3 L	10 x 0.6 L + 2 x 0.3 L	14 x 0.6 L	24 x 0.6 L
<i>Cold life (hasta +10°C) a +43°C</i>		32.1 h	-	30.3 h	57.9 h	114.9 h	134.6 h
<i>Cool life (hasta +20°C) a +43°C</i>		-	-	6.7 h	12 h	26.4 h	34.4 h
<i>Warm life (abajo a 0°C) a -20°C</i>		-	-	12.9 h	21.6 h	40.9 h	49.5 h
<i>Dimensiones al x an x fo (mm)</i>	<i>Exteriores</i>	430 x 347 x 281	210 x 250 x 150	299 x 362 x 283	437 x 588 x 288	499 x 550 x 475	499 x 710 x 550
	<i>Interiores</i>	208 x 223 x 139	125 x 190 x 80	186 x 260 x 156	245 x 460 x 180	270 x 340 x 260	264 x 496 x 334
	<i>Envío</i>	460 x 356 x 295	230 x 285 x 160	380 x 320 x 300	470 x 610 x 310	530 x 570 x 490	530 x 730 x 570
<i>Peso (kg)</i>	<i>Neto - vacío</i>	4.8	1.2	3.1	6.8	11.7	15.9
	<i>Envío</i>	7	2	4	10	17	23
<i>Espesor de aislamiento (poliuretano)</i>		51-116 mm	30 mm	23-27 mm	50-60 mm	90-105 mm	90-105 mm
<i>Código PQS</i>		E004 / 059	-	E004 / 002	E004 / 003	E004 / 004	E004 / 005

Para un transporte prolongado

B Medical Systems RCW25 | PCM y hielo seco

Los PCM de B Medical Systems son acumuladores térmicos que contienen un denominado material de cambio de fase (phase change material = PCM). Dicho material almacena el denominado calor latente a la temperatura deseada en el cambio de fase (líquido / sólido). De esa manera, el producto almacenado es mantenido a un nivel de temperatura casi constante sin refrigeración activa durante un determinado tiempo. Los elementos eutécticos de B Medical Systems existen en dos tipos: PCM+5 y PCM-30.

	PCM +5°C			PCM -30°C		
Volumen de carga	20 L			20 L		
PCM Tipo	+5°C			-30°C		
PCM Color	Azul			Naranja		
Número de elementos de PCM	14	18	24	14	18	24
Cold Life a +20°C (temperatura ambiente)	88.3 h (+2°C a +8°C)	108.4 h (+2°C a +8°C)	160.2 h (+2°C a +8°C)	50 h (por debajo de -20°C)	67 h (por debajo de -20°C)	92.5 h (por debajo de -20°C)
Cold Life a +43°C (temperatura ambiente)	10 h (+2°C a +8°C)	24.3 h (+2°C a +8°C)	40.7 h (+2°C a +8°C)	26.5 h (por debajo de -20°C)	40.2 h (por debajo de -20°C)	57.8 h (por debajo de -20°C)

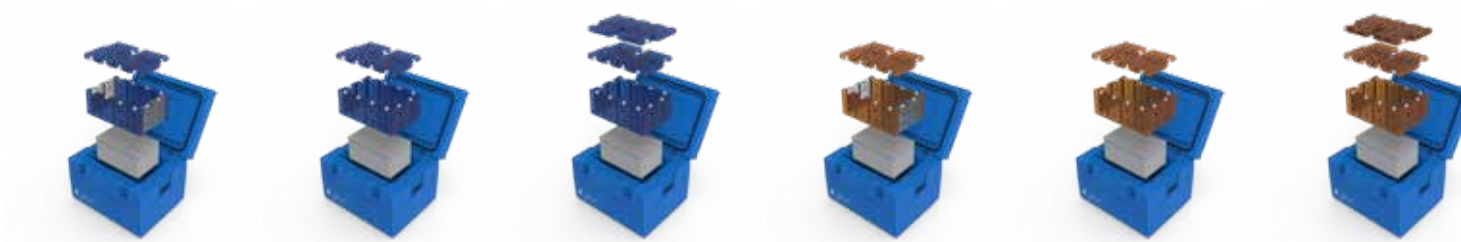

Datos de rendimiento para RCW25 utilizando hielo seco como elemento de refrigeración

Material active	Hielo seco - 9mm pellets	
Número de cajas Pfizer	2	4
Cantidad media de hielo seco (kg)	23	21
Cold Life a +20°C (temperatura ambiente)	218 h (por debajo de -60°C)	191 h (por debajo de -60°C)
Cold Life a +43°C (temperatura ambiente)	193 h (por debajo de -60°C)	140 h (por debajo de -60°C)

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

Congeladores de temperatura ultrabaja

B Medical Systems | Gama U

8 modelos • Volumen 232 > 949 L • Set point -82°C • Clase climática SN/T • Conforme DIN 13277 | MDR (EU) 2017/745, Clase IIa



● Exclusiva manija de barra con electrónica integrada



Todas las funciones son fácilmente accesibles:

- Control digital con todas las funciones
 - Pantalla táctil completa de 7" B Medical Systems integrada a una altura óptima en la manija de la puerta, con conexión preinstalada que permite las funciones exclusivas de monitoreo °B Connected
- Apertura y cierre con mecanismo 'para uso rudo' de bloqueo de puerta



● Modularidad versátil

Excelente capacidad de almacenamiento y modularidad - Amplia gama de racks para cada necesidad.

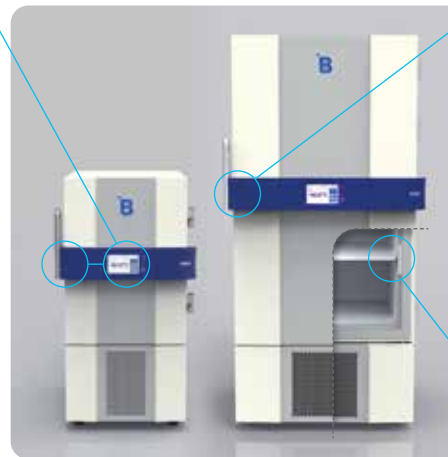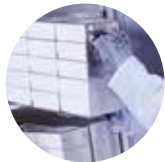

● Características especiales

- Válvula de liberación de presión integrada en la puerta, lo que permite la apertura más rápida con un movimiento y el acceso sencillo para la limpieza
- Puertas con aislamiento interior para una pérdida de frío considerablemente menor durante su apertura
- Compatibilidad total de los módulos interiores y los carriles; no requiere adquirir nuevos racks, puede guardar los utilizados previamente en los distintos modelos



● Materiales de alta calidad

Revestimiento de gran calidad, dispositivo médico certificado, antibacteriano y de acero de alta calidad para mayor duración y fácil control de la higiene.



Los congeladores de temperatura ultrabaja están previstos para almacenar componentes sanguíneos y plasma sanguíneo, células humanas, tejidos, vacunas con virus vivo y otras muestras de laboratorio a temperaturas ultrabajas de hasta -86°C . Los dispositivos incluyen un sistema de alarma integrado que advierte contra excursiones de temperatura inesperadas y cortes de energía. Los modelos U reflejan los máximos y más estrictos requerimientos con tecnología de vanguardia y economía. El sistema de frío está perfectamente adaptado por lo que respecta a consumo energético, disipación de calor y generación de ruido. El punto de ajuste estándar de fábrica es de -82°C ; la temperatura es ajustable entre -86°C y -20°C .



Datos técnicos

Congeladores de temperatura ultrabaja



	U201	U401	U401 V*2	U501	U501 V*2		
Volumen bruto / neto (l)	232 / 217	478 / 454	477 / 454	634 / 602	633 / 602		
Almacenamiento*1	Viales	17000 (2ml)	34500 (2ml)	34500 (2ml)	46000 (2ml)		
	Cryoboxes	170 (modelo H50)	345 (modelo H50)	345 (modelo H50)	460 (modelo H50)		
	Bolsas de plasma	150 (350ml)	300 (350ml)	300 (350ml)	400 (350ml)	400 (350ml)	
Temperatura preconfigurada (Set Point)	-82°C	-82°C	-80°C	-82°C	-80°C		
Rango de temperatura configurable <i>puede configurar en pasos de 0.1°C</i>			-86°C a -20°C				
Temperatura de alarma de frío / calor			-87°C / -77°C				
Clase climática (rango de temperatura)			SN / T (+10°C a +43°C)				
Descongelación			Manual				
Refrigerante			R290 / R170				
Dimensiones exteriores al x an x fo (mm)	1293 x 699 x 1039	1988 x 699 x 1039	1988 x 699 x 1039	1988 x 845 x 1039	1988 x 845 x 1039		
Dimensiones interiores al x an x fo (mm)	657 x 447 x 738	1375 x 447 x 738	1375 x 447 x 738	1375 x 593 x 738	1375 x 593 x 738		
Peso neto con equipo estándar (kg)	195	250	262	276	285		
Energy Saver	Rango de tensión (V)	230	220	230	220	220-240	
	Frecuencia (Hz)	50	60	50	60	50-60	
	Potencia (W)	2000	2000	2000	2000	2000	
	Consumo de energía (kWh/24h)	13.5	13.5	11.0	12.5	a 20°C : 6.7 (-80°C) / 5.5 (-70°C)	
	Calor disipado (Kcal/h): air / water cooled	209 / 115	338 / 125	326 / 121	405 / 150	291.6 / -	
	Tiempo de marcha del compresor (%)	48	48	46	44	-	
	Nivel de ruido (dB(A)) <i>(a 1m de altura y a 1m de distancia)</i>	49	50	49	50	46	
Hold over time (-80°C a -60°C)	1.8 h	1.8 h	2.1 h	2.1 h	1.82 h		
					2.7 h	2.7 h	1.37 h

*1 Solamente a título indicativo. *2 V significa tecnología de refrigeración de velocidad variable.



Datos técnicos

Congeladores de temperatura ultrabaja



	U701	U701 V*2	U901
Volumen bruto / neto (l)	791 / 751	790 / 751	949 / 900
Almacenamiento*1	Viales	57500 (2ml)	57500 (2ml)
	Cryoboxes	575 (modelo H50)	575 (modelo H50)
	Bolsas de plasma	500 (350ml)	500 (350ml)
Temperatura preconfigurada (Set Point)	-82°C	-80°C	-82°C
Rango de temperatura configurable <i>puede configurar en pasos de 0.1°C</i>		-86°C a -20°C	
Temperatura de alarma de frío / calor		-87°C / -77°C	
Clase climática (rango de temperatura)		SN / T (+10°C a +43°C)	
Descongelación		Manual	
Refrigerante		R290 / R170	
Dimensiones exteriores al x an x fo (mm)	1988 x 992 x 1039	1988 x 992 x 1039	1988 x 1139 x 1039
Dimensiones interiores al x an x fo (mm)	1375 x 740 x 738	1375 x 740 x 738	1375 x 887 x 738
Peso neto con equipo estándar (kg)	297	305	320

Energy Saver	Rango de tensión (V)	230	220	115	220-240	230	220
	Frecuencia (Hz)	50	60	60	50-60	50	60
	Potencia (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Consumo de energía (kWh/24h)	11.9	13.5	10.6	a 20°C : 7.5 (-80°C) / 6.3 (-70°C)	12.4	15.5
	Calor disipado (Kcal/h): air / water cooled	426 / 158	511 / 189	645 / -	309.54 / -	444 / 164	567 / 210
	Tiempo de marcha del compresor (%)	50	55	57	-	59	61
	Nivel de ruido (dB(A)) <i>(a 1m de altura y a 1m de distancia)</i>	48	49	47	46	51	52
	Hold over time (-80°C a -60°C)	2.5 h	2.5 h	2.5 h	2.2 h	2.3 h	2.3 h



Nuestros productos se utilizan en todo el mundo
para almacenar vacunas y otros productos sensibles a la temperatura.

B



500K+ productos instalados



Presencia en 170+ países



100+ patentes



100+ dispositivos médicos certificados



Blood Management Solutions

Manejo global y seguro de la sangre: desde la recolección hasta la transfusión, el transporte, el procesamiento y el almacenamiento



Vaccine Cold Chain

Soluciones confiables para una vacunación segura alrededor del mundo



Medical Refrigeration

Tecnología de vanguardia para las exigentes necesidades del mundo de la medicina



Soporte y servicio posventa

Nos esforzamos para brindarle un servicio con los más altos estándares, no sólo a través de nuestros exclusivos socios y distribuidores para mantenimiento y servicios, sino también en la resolución de problemas en segunda línea y el servicio posventa. Este grupo de ingenieros en planta está allí para ayudar a nuestros socios y a usted a encontrar la mejor solución para sus necesidades de almacenamiento en frío.

Nuestra experiencia global



SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems (anteriormente Dometic Medical Systems) tiene más de 40 años de experiencia en el sector de la refrigeración médica.

La empresa, conocida antiguamente como Electrolux Medical Systems, fue fundada en 1979 cuando la Organización Mundial de la Salud se puso en contacto con Electrolux en Vianden (Luxemburgo) para desarrollar una solución para el almacenamiento y transporte seguro de vacunas alrededor del mundo. En 2001, Electrolux Medical Systems pasó a formar parte de Dometic Group, y cambió su nombre a Dometic Medical Systems. En 2015 después de MBO, la empresa fue nombrada B Medical Systems.

B Medical Systems S.à r.l.

17, op der Hei
L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Tel.: (+352) 92 07 31-1
info@bmedicalsistemas.com



www.bmedicalsistemas.com

WE SUPPORT



Desde 2019 B Medical Systems ha estado comprometido con la iniciativa de responsabilidad corporativa del Pacto Mundial de la ONU y sus principios en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Luxemburgo, en el corazón de Europa

